



エンドセプト

多機能酵素洗浄剤

使用前に必ず使用手順書と安全データシートをお読み下さい。

用途：前処理専用洗浄剤

■ 使用方法**<浸漬と用手洗浄>**

1. 流水下で器具をすすぎ、目に見える汚れを除去します。
2. ENDOCEPT を 165～300 倍(約 3～6 ml/ℓ)で希釈します。
 - * 洗浄剤の最良効果を得るには、本剤を常温 25 度以上の水に混ぜて下さい。
 - * その時の器具の汚れの度合いや洗浄方法により濃度を調整して下さい。
 - * 毎日、新しい洗浄液を用意して下さい。
3. 器具を最低 2 分以上浸漬して下さい。
 - * その時の器具の汚れがひどい場合は、浸漬時間を必要に応じて長くして下さい。
4. 洗浄後、器具を取り出し、ぬるま湯で十分にすすぎます。

<超音波洗浄器>

- ・超音波槽を使用する場合は、超音波トランスデューサーを作動させる前に本剤 3～6ml/ℓを入れて下さい。
- ・各機器メーカーが勧める方法に従って下さい。
警告：エアロゾル化した酵素洗浄剤は吸入リスクがあります。
超音波洗浄器を使用する場合は、蓋をするか密閉容器にして使用して下さい。

<自動内視鏡洗浄装置/ウォッシャーディスインフェクター>

- ・各機器メーカーが勧める方法に従って下さい。
- ・酵素洗浄剤の投与量とサイクルパラメータについては各機器メーカーのガイドラインに従うか、上記の希釈推奨倍率 を使用して下さい。
- ・ウォッシャーディスインフェクターも同様に各機器メーカーの推奨に従うか、本剤 2～4ml/ℓを使用して下さい
水温の上限は 55℃にしてください。

注記： 洗浄液が濁ってきたら、使用ごとに交換して下さい。

■ 使用上の注意

- ・必要に応じて適切な保護具(保護手袋・保護メガネ等)を着用すること。
- ・子供の手の届かない所に保管すること。
- ・使用手順書に記載された以外の方法で使用しないこと。
- ・表示された有効期限を過ぎた本剤は使用しないこと。

■ 応急処置

- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
- ・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
- ・吸入した場合：新鮮な空気のある場所へ移動させること、気分が悪い時は、医師に連絡すること。
- ・誤飲した場合：気分が悪い時は、医師に連絡すること。口をすすぐこと。

■ 保管方法

- ・直射日光を避け、換気のよい冷暗所で保管すること。
- ・容器はしっかりと密閉すること。

■ 製造元：Whiteley Corporation(オーストラリア)**■ 販売元/お問合せ先：株式会社ネクステラ**

〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津 4-7-5 TEL 092-402-2608

info@next-era.co.jp**■ 参考**

推奨希釈倍率(1ℓで希釈の場合)：

ENDOCEPT™	希釈倍率
3ml	165 倍
4ml	300 倍

※使用水質、器材の汚れにより希釈倍率を選択します。

希釈使用例：

作成用液	166倍(推奨)	約300倍
1ℓ	6ml	4ml
5ℓ	30ml	17ml
8ℓ	50ml	27ml
11ℓ	70ml	37ml
26ℓ	160ml	87ml